

# MediMix<sup>vigo</sup><sup>®</sup>

Die erste intelligente Peristaltikpumpe



## Die automatisierte Apothekenlösung für den Flüssigkeitstransfer: **Repeats and Repeats and Repeats...**

Die IMF GmbH freut sich, Ihnen eine neue Rollenpumpe zur Erleichterung des Apothekenalltags vorzustellen. Anwendbar überall dort, wo Flüssigkeiten schnell und präzise gemischt, transferiert oder abgefüllt werden müssen.

- **Flexibel:** Ideal für die Rekonstitution von Medikamenten, Befüllung von Beuteln, Spritzen, Elastomerpumpen und Enteralspritzen.
- **Effektiv:** Erleichterung der Arbeitsbelastung des Fachpersonals.
- **Sicher:** Ermöglicht die vollständige Rückverfolgbarkeit durch die Verwendung der modernsten Barcode-Technologie, automatische Gewichtskontrolle durch eine integrierbare Waage.
- **Kompakt:** Durch seine optimalen Abmessungen eignet sich das Gerät auch für kleinere Laminar-Flow Schränke oder Isolatoren.

# MediMix<sup>vigo</sup><sup>®</sup>

Der intelligente peristaltische Compounder für die Übertragung von Flüssigkeiten



## Technical Data

Bezeichnung:	MediMix Vigo MF 4310
Max. Geschwindigkeit:	850 ml/min
Genauigkeit:	± 20% bei 0,1 ml; ± 10% bei 0,2 ml; ± 4% bei 0,5 ml; ± 2% bei 1 ml
Mischmengen:	Min 0,1 ml; Max 9,9 Liter bei Schritten von 0,01 ml
Stromversorgung:	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 100 VA
Lärmemission:	unter 70 dB(A)
Gehäuse BxTxH:	200 mm x 245 mm x 152 mm
Platzbedarf BxTxH:	210 mm x 350 mm x 162 mm
Gewicht:	4,9 kg
Arbeitstemperatur:	bis +40°C

- Hohe Abfüllgeschwindigkeit bis 850 ml pro Minute
- Einfache und intuitive Bedienung durch integrierten Touchscreen
- Vernetzbarkeit mit den gängigen Medikamenten-Management-Systemen

## Weitere Merkmale:

### Drawback:

- Dieser verhindert das Nachtropfen überschüssiger Flüssigkeit z. B. bei Druckbefüllung von Elastomerpumpen und vermeidet den Gegendruck beim Befüllen.

### Rezeptureingabe:

- Rezepturen können manuell erstellt und auf dem Gerät zum späteren Abruf gespeichert werden. Alternativ können die Rezepturen über eine externe Datenanbindung eingespielt werden, um manuelle Eingabefehler zu vermeiden.
- Datenbank für Ausgangslösungen und Behältnisse: Zur Speicherung von Informationen über Inhaltsstoffe und Endbehältnisse.

### Dokumentation:

- Diese wird am Ende jeder Rezeptur zur Verfügung gestellt, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

## Optionales Zubehör:

Netzwerkkabel: MF 4512 (2 m), MF 4515 (5 m)

Barcode Lesegerät: MF 4518 (kabelgebunden), MF 4517 (kabellos).

Waagenkabel: MF 4524, zum direkten Anschluss an eine Waage.

Druckerkabel: MF 4526, zum direkten Anschluss an einen Drucker.

Fußschalter: MF 4400

Verkauf / Sales

info@imf.de

Tel.: +49(0)2351/550610

Fax.: +49(0)2351/550611



Impromediform<sup>®</sup>

www.imf.de



IMPROMEDIFORM GmbH